

Schutzhaube


WICHTIG!

Alle Einzelteile aus denen die Schutzhaube besteht, sind nicht unter sterilen Bedingungen produziert worden.
Vor dem Öffnen der Verpackung und bei der Montage der Schutzhaube muss folgende Anleitung befolgt werden.

INHALT

1 Stück

EINZELTEILE

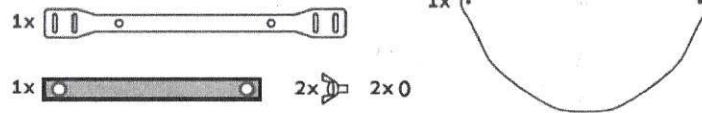


ANWENDUNG

Die Schutzhaube ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzmassnahmen bei der Arbeit sowie im allgemeinen Alltag. Durch die ergonomische Form und Ausführung wird die Schutzhaube beim Gebrauch nur im geringem Mass wahrgenommen. Ihre Hauptaufgabe ist es den Benutzer vor Viren (u.a. COVID-19) sowie Mikroorganismen und Schmutz zu schützen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Vor dem Öffnen der Verpackung sollen die Hände gewaschen, desinfiziert und Gummihandschuhe übergezogen werden.
2. Nach dem Öffnen sollen alle Einzelteile, ausser der Schutzscheibe, mit einem weichen Tuch und einem Desinfektionsmittel von mindestens 60% Alkohol desinfiziert werden.
3. Nun muss die Schutzfolie der Schutzscheibe beidseitig abgezogen werden.
4. Nach dem Desinfizieren sollen die Handschuhe sowie Tücher entsorgt werden.
5. Das Band durch die Öffnungen durchziehen und die Öse des Bandes auf die Schraubniete setzen.
6. Die Schutzscheibe auf die Schraubniete setzen, darauf die Unterlagscheibe und nun mit der Butterflanschschraube fixieren.

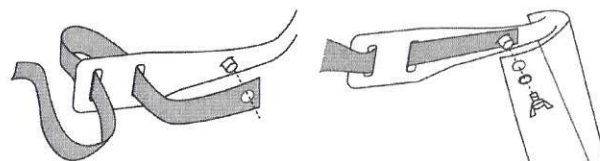

Made in EU